



Hygiène
en milieu médical

Daily
PREMIUM

Klean' Wipe Des

Lingettes désinfectantes mains, surfaces et dispositifs médicaux* sans rinçage

PROPRIÉTÉS

Lingettes agréées contact alimentaire conçues pour désinfecter les mains, les surfaces (bureaux, souris, claviers...) ainsi que les dispositifs médicaux *non invasifs (stéthoscopes, électrodes, fauteuils roulants, lunettes...). Taille de la lingette : 13 x 18 cm | Non tissé standard blanc : Grammage 25g/m².

CONSEILS D'UTILISATION

Ôter le couvercle, et retirer l'opercule. Passer une lingette prise au centre de la bobine dans la fente du couvercle. Lingettes à usage unique prêtes à l'emploi - Utiliser dans les 30 jours après ouverture. Respecter un temps de contact selon la désinfection souhaitée. Appliquer sur l'ensemble de la zone à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire. Répéter l'application chaque fois que nécessaire. Bien refermer l'emballage après chaque ouverture. Ne pas réutiliser la lingette. La désinfection ne pourrait plus être garantie. NE PAS JETER LA LINGETTE DANS LES TOILETTES. Utiliser les biocides avec précaution, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



Réf. **555201**



Fabriqué en France



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------|---------------------------|
| Aspect | Spunlace non tissé |
| Couleur | Blanc |
| Parfum | Sans |
| pH | 7 |
| Contenance | 100 lingettes |

CONDITIONNEMENT

| | |
|----------------------------|------------------------|
| EAN | 3700008300920 |
| Colisage | Carton |
| Unités par carton | 12 boîtes |
| Dimension d'un carton (mm) | 335 x 225 x 251 |
| Cartons par palette | 90 |
| Nombre de couches | 6 |
| Colis par couche | 15 |
| Unités par palette | 1080 |



COMPOSITION INDICATIVE & NORME

Substances actives : Ethanol (CAS 64-17-5) : 65.8% (m/m).
Type de produit TP1 et TP2/TP4. Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) mise à disposition. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59. Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications). Conforme au règlement biocide (UE) n°528/2012 - TP1, TP2, TP4. Utiliser les biocides avec précaution, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONSEILS DE PRUDENCE

DANGER. H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence (Phrases P) : P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P280 Porter un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. P501 Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

EFFICACITÉ BACTÉRICIDE

| NORMES | SOUCHES | TEMPS |
|---------|---|---|
| EN1276 | Pseudomonas Aeruginosa Escherichia Coli Staphylococcus Aureus Enterococcus Hirae | 1 minute <i>en condition de saleté</i> |
| EN13697 | Pseudomonas Aeruginosa Escherichia Coli Staphylococcus Aureus Enterococcus Hirae | 1 minute <i>en condition de saleté</i> 30 secondes <i>en condition de propreté</i> |
| EN1500 | Escherichia Coli | 30 secondes |

EFFICACITÉ LÉVURICIDE

| NORMES | SOUCHES | TEMPS |
|---------|------------------|---|
| EN1650 | Candida Albicans | 1 minute <i>en condition de saleté</i> |
| EN13697 | | |

EFFICACITÉ FONGICIDE

| NORMES | SOUCHES | TEMPS |
|---------|---|---|
| EN13697 | Candida Albicans Aspergillus Basiliensis | 5 minutes <i>en condition de saleté</i> |
| EN13624 | Candida Albicans Aspergillus Basiliensis | 1 minute <i>en condition de propreté</i> |

EFFICACITÉ VIRUCIDE

| NORMES | SOUCHES | TEMPS |
|---------|---|--|
| EN14476 | Virus de la Vaccine souche Ankara ATCC - VR1508 | 15 minutes <i>en condition de saleté</i> |
| EN14476 | Coronavirus Humain 229E | 30 secondes <i>en condition de propreté</i> |
| EN14476 | H1N1 Norovirus Rotavirus | 1 minutes <i>en condition de propreté</i> |
| EN16777 | SARS - CoV-2 | 1 minutes <i>en condition de propreté</i> |